



ST. REED™ PLUS

Cateter de Bloqueio Epidural Terapêutico Dirigível

Minimamente Invasivo
Recuperação Acelerada



Artroimplan
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Cateter de Bloqueio Epidural Terapêutico Dirigível St.Reed Plus

A utilização do cateter dirigível é um método comprovado usado para romper o tecido cicatricial mecanicamente ou quimicamente e descomprimir os nervos espinhais sem a necessidade de cirurgias abertas. Com resultados duradouros, o tratamento permite o alívio de dores agudas associadas a distúrbios da coluna vertebral. O Cateter St. Reed Plus é um cateter dirigível com alto controle para tratamento preciso no canal espinhal/foraminal onde se localiza a patologia.



ST.REED
PLUS

Indicações

- Dor Crônica Nas Costas
- Estenose Espinhal/ Foraminal
- Síndrome Pós-Laminectomia
- Hérnia de Núcleo Pulposo
- Lombalgia
- Discopatia Lombar
- Dorsalgia

Informação do Produto

No.	Código	Descrição	Qtd
1	SWV33	Cateter Dirigível	1
2	SWP-33R	Introdutor/Agulha/Estilete	1

Vantagens

- Terapia de risco reduzido
- Minimamente Invasivo
- Sem anestesia geral
- Elevadas taxas de sucesso
- Sem formação de cicatriz
- Sem cirurgia aberta
- Tempo de hospitalização reduzido
- Recuperação acelerada
- Pode ser repetido a qualquer momento
- Ideal para pacientes já submetidos a cirurgias anteriores
- Tratamento focado na raiz do problema

Contraindicações

- Gravidez
- Infecções
- Doença Mental

Características

- Atua bidirecionalmente
- Visível em fluroscopia
- Ponta distal dirigível
- De fácil manipulação
- Controle altamente preciso com botão para travar/destravar
- Não há necessidade de retirar o fio-guia para injetar o medicamento

Instruções de Uso

- Preparação para o procedimento:
 - Posição Prone: Posicionar o paciente na mesa de operação.
- O C-braço é girado para a posição lateral para melhor visualização do hiato do paciente.
- Colocar o avental no paciente com abertura ao redor do hiato.
- Fazer anestesia local no paciente.
- Perfurar o hiato com o auxílio do Introdutor/Agulha/Estilete.
- Retirar a Agulha e o Estilete.
- Deixar o Introdutor no hiato.
- Inserir o Cateter Epidural St. Reed Plus até alcançar o espaço Epidural.
- Verificar a localização do cateter com o auxílio do C-braço.
- Injetar o medicamento dentro do corpo do paciente.



Etapa-D



Etapa-E



Etapa-F



Etapa-H



Etapa-J